

medi



mediven®

Medikal Basınç ve
Anti-Emboli Çorapları,
Lenf-Ödem Bası Giysileri


medi. I feel better.

Varis ve kompresyon tedavisi

Varis nedir?

Varis, kirli kanı taşıyan toplardamarlarda görülen bir hastalıktır. Ana atar-damarlardan vücudun alt kısımlarına, ayak ve bacaklara giden kan, yerçekimine karşı koyarak kalbe geri dönmek zorundadır. Kılcal damarlara gelen kanın basıncı çok düşüktür bundan dolayı kanın kalbe dönüşünü kolaylaştırmak için toplardamarlar içinde kapakçıklar bulunmaktadır. Bu kapakçıkların zamanla deforme olması sonucunda, kan kalbe doğru tam olarak akamaz ve damar içinde göletler oluşur. Bunlar dışarıdan yeşil-mavi olarak görülen şişmiş damarlar olarak fark edilir. Bu da varisli damarların başlangıcını oluşturur.

Görevini yapamaz hale gelmiş bu kapakçıkların, fonksiyonlarını tekrar kazanmaları mümkün değildir. Ancak kapakçıkların çalışmasına yardımcı olabilecek tedavi yöntemlerine başvurulabilir.

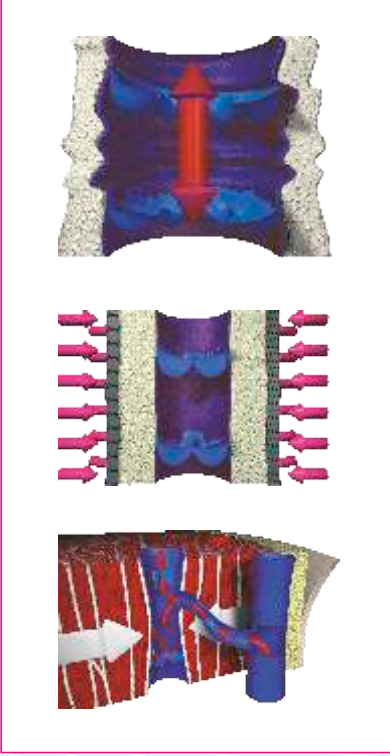

Kademeli basınç sistemi



şişmiş damarlar



varisli damarlar



CVI - II. aşama



ülser

Varis çorabı nasıl etki eder?

Varis çorabı; varis tedavisinde en kolay uygulanan tedavi yöntemidir. Özellikle yaşlılar ve hamileler gibi ameliyat olamayan ya da ilaç alamayan hastalarda kullanılabilen tek tedavi yöntemidir.

Varis çorabı, damarları çevreleyen kasları uyarak, damar içinde deforme olmuş kapakçıkların çalışmasına yardımcı olur. Bacak çevresinde yarattığı basınçla bacaklardaki kanın kalbe geri dönüşünü sağlar. Varis çorabının görevini yerine getirebilmesi için, doğru ölçüler alınarak verilen varis çorabının kullanılması gerekir.

Varis çoraplarının uyguladıkları basınç değerleri uluslararası RAL tarafından belirlenmiş değerlerdir.

Varis çorabı nasıl kullanılır?

- Varis çoraplarının, sabahları yataktan kalkar kalkmaz giyilmesi ve yatana kadar çıkarılmaması gerekir.
- Varis çorapları her gün yıkanmalıdır. Bu şekilde hem hasta uyumu daha yüksek olur, hem de varis çorabının basınç profili değişmez.
- Varis çorabının ömrü 6-8 ay kadardır.
- Mediven Varis Çorapları makinede 40°C'de ve hassas programda yıkanıp, kurutabilir.

Basınç sınıfları

| CCI | Bileğe uygulanan basınç (mmHg) |
|---------|--------------------------------|
| class 1 | 18-21 |
| class 2 | 23-32 |
| class 3 | 34-46 |
| class 4 | > 49 |

mediven® elegance

Yüksek beklentiler için basınçlı çorap

Parlak ve şeffaf, eşsiz yumuşaklık ve esneklikte, en yüksek beklentileri bile karşılayabilen basınçlı çoraptır. Yeni **mediven® elegance** mükemmel giyim rahatlığı ile medikal gereksinimlerin eşsiz bir birleşimidir. En iyi tedaviyi, en iyi konfor ve estetikle size sunar.

Özellikler

mediven® elegance, mükemmel şeffaflığı ve hava geçirgenliği ile beklentileri yüksek hastaları bile tatmin edecek konfor ve uyumu sağlar.

- Yenilikçi dokuma ve materyal teknolojisi
Dermatolojik olarak test edilmiş dokuma sistemi sayesinde mükemmel esneklik sağlar. Külütlü modellerde kalça ve karın anatomisine uyumlu yapısı ve bilekte katlanma yapmayı önlemek için özel olarak dizayn edilmiş topuk kısmı sayesinde tam uyum sağlar. Diz altı modellerde yumuşak ve geniş bitiş lastiği kaymayı engellerken herhangi bir kesme ya da tahriş etmeye neden olmaz.
- Clima-Comfort® Teknoloji
Patentli bu sistem sayesinde özel hammadde nemi deriden hızla emer ve dışarı atar. Bu sayede cilt üzerinde terleme ve rahatsızlık oluşmaz. Tüm çorap bu hava geçirgen sistemle dokunmuştur.
- Medikal basınç profili
Kademeli basınç sistemi sayesinde basınç profilinin doğru olduğunu kesin olarak garanti eder.
- Bir dokunuştan bile daha yumuşak
Konforlu bir kullanım ve uyum sunar.
- Climafresh sistem
Patentli antibakteriyel dokuma ile ayaklar rahat ve güvenlidir.
- Geniş renk, beden ve model seçenekleri
Parlak ince görünümü, geniş renk yelpazesi ve **Swarovski** taşlı modeller ile farklı gereksinimlere hitap eder.
- Cilde dost
Eko-Tex 100 standardına göre üretilmektedir, hipoalerjiktir.
- Yıka ve giy
Makinede yıkanabilir ve kurutulabilir.

| MODEL | A - D dizaltı | A - G/Sn dizüstü silikon bantlı (kasiğa kadar) | A - T külütlü | A - T/u külütlü hamile |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| KOD | class 1 | class 1 | class 1 | class 1 |
| class 1 | 186* | 169-159* | 192* | 194* |
| class 2 | 286* | 269-259* | 292* | 294* |

* petit (kısa) modeller

| Çevre ölçüsü (cm) | Bedenler | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| cB | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
| cC | 28-34 | 30-37 | 33-40 | 35-43 | 27-46 | 39-49 | 41-51 |
| cG | 43-48 | 45-52 | 49-56 | 53-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 |



CCL 1, 2





CCL 1, 2, 3



Bay/bayan günlük yaşamda uzun süreli kullanabileceğiniz yüksek konfor sunan çorap

İlerlemiş varisler için geliştirilmiş özellikleri ile yüksek konforlu ve uzun süreli kullanım olanağı sunar. Geniş basınç dağılımı ile şişmiş varis damarlarının tedavisi için mutlak önerilen bir çoraptır.

Özellikler

- Clima-Comfort® Teknoloji
Patentli bu sistem sayesinde özel hammadde nemi deriden hızla emer ve dışarı atar. Bu sayede cilt üzerinde terleme ve rahatsızlık oluşmaz. Tüm çorap bu hava geçirgen sistemle dokunmuştur.
- Yüksek teknoloji çift kompresyon dokuma
Mükemmel esneklik ve giyim kolaylığı ile tam uyum sağlar.
- Medikal basınç profili
Kademeli basınç sistemi sayesinde basınç profilinin doğru olduğunu kesin olarak garanti eder.
- Mikroblok ağ bölümü
Ağ bölümünde geliştirilmiş dayanıklı dokuması ile daha rahat ve konforlu bir kullanım sunar.
- Dizüstü silikon üst bant
Kaymayı önleyen silikon üst bant sayesinde gün boyunca rahatlıkla kullanılabilir.
- Açık burun modellerde yumuşak dokuma
Ayağı çevreleyen dokumanın yumuşaklığı kullanımı kolaylaştırır, kesme yapmaz.
- Climafresh sistem
Patentli antibakteriyal dokuma ile ayaklar rahat ve güvenlidir.
- Geniş renk, beden ve model seçenekleri
Farklı gereksinimleri karşılarken mükemmel uyum sağlar.
- Cilde dost
Eko-Tex 100 standardına göre üretilmektedir, hipoalerjiktir.
- Yıka ve giy
Makinede yıkanabilir ve kurutulabilir.

MODEL



KOD

| | A - D | A - G/Sn | A - T |
|---------|------------|----------|----------|
| class 1 | 101 | 108 | 109 |
| class 2 | 201 | 200 | 211 |
| class 3 | 401 / 434* | 400/436* | 409/431* |

* burmu kapalı modeller





| Çevre ölçüsü (cm) | Bedenler | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| cB | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
| cC | 28-34 | 30-37 | 33-40 | 35-43 | 27-46 | 39-49 | 41-51 |
| cG | 43-48 | 45-52 | 49-56 | 53-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 |

Bay/bayan günlük yaşamda uzun süreli kullanabileceğiniz yüksek konfor sunan çorap

İlerlemiş varisler için geliştirilmiş özellikleri ile yüksek konforlu ve uzun süreli kullanım olanağı sunar. Geniş basınç dağılımı ile şişmiş varis damarlarının tedavisi için mutlak önerilen bir çoraptır.

Özellikler

- Clima-Comfort® Teknoloji
Patentli bu sistem sayesinde özel hammadde nemi deriden hızla emer ve dışarı atar. Bu sayede cilt üzerinde terleme ve rahatsızlık oluşmaz. Tüm çorap bu hava geçirgen sistemle dokunmuştur.
- Yüksek teknoloji çift kompresyon dokuma
Mükemmel esneklik ve giyim kolaylığı ile tam uyum sağlar.
- Medikal basınç profili
Kademeli basınç sistemi sayesinde basınç profilinin doğru olduğunu kesin olarak garanti eder.
- Mikroblok ağ bölümü
Ağ bölümünde geliştirilmiş dayanıklı dokuması ile daha rahat ve konforlu bir kullanım sunar.
- Dizüstü silikon üst bant
Kaymayı önleyen silikon üst bant sayesinde gün boyunca rahatlıkla kullanılabilir.
- Açık burun modellerde yumuşak dokuma
Ayağı çevreleyen dokumanın yumuşaklığı kullanımı kolaylaştırır, kesme yapmaz.
- Climafresh sistem
Patentli antibakteriyal dokuma ile ayaklar rahat ve güvenlidir.
- Geniş renk, beden ve model seçenekleri
Farklı gereksinimleri karşılarken mükemmel uyum sağlar.
- Cilde dost
Eko-Tex 100 standardına göre üretilmektedir, hipoalerjiktir.
- Yıkama ve giy
Makinede yıkanabilir ve kurutulabilir.

| MODEL | | | |
|---|---|---|---|
| | A - D dizaltı | A - G/Sn dizüstü silikon bantlı (kasiğe kadar) | A - T külotlu |
|  |  |  |  |
| (cm) | | | |
| KOD | | | |
| class 1 | 140 | 161 | 110 |
| class 2 | 240 | 261 | 210 |

| Çevre ölçüsü (cm) | Bedenler | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | S | M | L | XL | XXL |
| cB | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 30-32 |
| cC | 28-34 | 32-38 | 36-42 | 40-46 | 42-50 |
| cG | 47-54 | 52-60 | 56-65 | 62-72 | 65-76 |



CCL 1, 2



mediven® for men



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



CCL 1, 2

Yaşantınızın her adımına uyum sağlayacak, modern erkek çorabı

Erkekler için özel olarak tasarlanmış diz altı varis çorabıdır. Modern görünümü, tasarımı ve dokusu ile birlikte yüksek giyim konforu da sunmaktadır. Yumuşak, elastik ve pürüzsüz bir dokumaya sahiptir.

Özellikler

- Sağ ve sol ayak anatomisine uygun üretim
Kullanım sırasında maksimum konfor sağlamak için, sağ ve sol ayak anatomisine göre farklı dokumaya sahiptir.
- Bir dokunuştan bile daha yumuşak
Özel olarak geliştirilmiş ipliklerle elde edilen pürüzsüz ve yumuşak dokuması ile konforlu bir kullanım ve uyum sağlar.
- Geniş fitilli dokuma ile daha modern görünüm
- Clima-Comfort teknoloji
Patentli bu sistem sayesinde özel hammadde nemi deriden hızla emer ve dışarı atar. Bu sayede cilt üzerinde terleme ve rahatsızlık oluşmaz. Tüm çorap, bu hava geçiren sistem ile dokunmuştur.
- Clima-Fresh sistem
Antimikrobiyal etkiye sahip, geliştirilmiş patentli bu dokuma ile ayaklar rahat ve güvenlidir.
- Geniş renk ve beden seçenekleri
Günlük yaşama uyarlanmış bu çorap grubunda, her zevke özel 4 farklı renk alternatifi mevcuttur.
- Cilde dost
Eko-Tex 100 standartlarına göre üretilmektedir, hipoalerjiktir.
- Yıka ve gjy
Makinede yıkanabilir.



MODEL



KOD

| | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| class 1 | 3A4-3 | 3A4-6 | 3A4-5 | 3A4-2 |
| class 2 | 3B4-3 | 3B4-6 | 3B4-5 | 3B4-2 |





| Çevre ölçüsü (cm) | Bedenler | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| cB | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
| cC | 28-34 | 30-37 | 33-40 | 35-43 | 27-46 | 39-49 | 41-51 |

Sağlıklı venler için, etkisi klinik olarak onaylanmış tek seyahat çorabı

mediven® travel, basınçlı çorap üretilmesi ve geliştirilmesi alanında onlarca yıllık deneyimin sonunda yaratılmış bir üründür. Klinik olarak test edilmiş profilaksis ürünlerde bulunması gereken tüm özelliklere sahiptir. Doktorlar, teknisyenler ve kullanıcılardan oluşan bir ekip tarafından etkisi ve sonuçları garanti edilen mükemmel bir çoraptır.

Özellikler

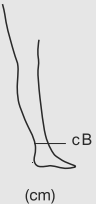- Dizaltı çorap
Yolculuklar sırasında giyim kolaylığı ile tam uyum sağlar.
- Yumuşak baldır dokuması
Yumuşak bitiş dokuması kesme yapmaz, rahat kullanılır.
- Örmek tekniği
Özel örmek tekniği kaymayı önler.
- Clima-Comfort® Teknoloji
Patentli bu sistem sayesinde nem dengesi düzenlenir, cilt üzerinde terleme oluşmaz, tüm çorap bu hava geçirgen sistemle dokunmuştur.
- Clima-fresh sistem
Patentli antibakteriyel dokuma ile ayaklar rahat ve güvenlidir.
- Cilde dost
Eko-Tex 100 standardına göre üretilmektedir, hipoalerjiktir.
- Yıkama ve giyme
Makinede yıkanabilir ve kurutulabilir.

| MODEL | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| (cm) | A - D dizaltı | caramel karamel | black siyah |
| KOD | | | |
| | | 177-1 | 177-5 |

| Çevre ölçüsü (cm) | Bedenler | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | S | M | L | XL | XXL |
| cB | 18-20 | 20-23 | 23-26 | 26-29 | 29-32 |



18-20 mmHg



mediven® armsleeve



Clima Comfort



Double ellipses



Perfect Fit



Variety

CCL-1 (15-21 mmHg)

CCL-2 (23-32 mmHg)



Mastektomi sonrası oluşan ödem tedavisinde seçilebilecek en doğru ürün.

Endikasyonlar

Koldaki birincil ve ikincil lenf ödemlerin bilekten başlayarak ya ya da eli de kapsayarak tedavisi
Post-operatif ve post-travmatik ödem

Ürün Özellikleri

RAL standartlarına uygun 1. sınıf kalitede ürün .
Etkili ve yenilikçi dokuma dizaynı ile yumuşak ve estetikdir.
Dirsek kısmı ekstra koruyucu materyalle güçlendirilmiştir.
Latex içermez
Doğal nemlendirici özelliğindeki lanolin içerir
40°C de makinede yıkanabilir ve kurutulabilir.

Örgü sisteminin özellikleri

Eşsiz comfort zone özelliğine sahiptir.

Double elips özelliği ile dirsek iç kısmının daha rahat hareket etmesini ve kişinin günlük yaşam aktivitelerinde daha rahat olmasını sağlar. Bu yenilikçi örme sistemindeki elipsler dirseğin fleksiyon ve ekstansiyon sırasındaki basınç hissini azaltır, lenfatik drenajı optimum seviyeye çıkarır. Hareket esnasında dirsek iç kısmında meydana gelen kırıksıklıklar en aza iner, bu sayede ağrı azalır.

Double elips teknolojisi Medi'nin patentli teknolojisidir. Bu yeni serinin etkinliği garantilidir.

Özellikle post op ve post travmatik tedavilerde kullanılır.

Nefes alan bir yapıya sahip silikon bantlar koluğun kaymasını önler, konforlu bir kullanım sunar.

Kişiyeye özel üretim yapılabilmektedir.

| MODEL | | | | |
|----------------|-----|-----------------------|----------|-------------|
| | el | kol silikon bantlı | kol+askı | el+kol+askı |
| | | | | |
| KOD | | | | |
| class 1 | | 710 | 738 | 740 |
| class 2 | 723 | 712 | 742 | 744 |

| Çevre ölçüsü (cm) | Bedenler | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | II | III | IV | V | VI | VII |
| cA | 16-19 | 18-21 | 20-23 | 22-25 | 24-27 | 26-29 |
| cC | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 |
| cE | 20-26 | 23-29 | 26-32 | 29-35 | 32-38 | 35-41 |
| cG | 22-29 | 25-32 | 29-36 | 33-40 | 37-44 | 41-48 |

mediven® thrombexin® 18

Emboliden korunmak için etkili çözüm





Bileğe 18 mmHg basınç uygulayan anti-emboli çorapları.

Özellikler

- DVT riskini azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.
- Topukta bası yarısı riskini azaltan güçlendirilmiş ekstra yumuşak topuk bölümü (soft heel) bulunmaktadır.
- Metatarsal bölgedeki gözlem açıklığı kan dolaşımının kontrol edilmesini kolaylaştırır.
- Dizaltı, dizüstü, ve dizüstü bel kemerli olmak üzere 3 farklı modeli bulunmaktadır.
- Kaymayan silikon üstbandı çorabın düşmesini engeller.
- Değişik renklerle kodlandırılmış topuk ve baldır bölümü beden seçimini kolaylaştırır.
- Latex içermeyen özel dokuması sayesinde elastik yapısı ile hastaya uyumu yüksektir.
- Climafresh sistem
Parmak bölgesindeki patentli antibakteriyel dokuma (antibacterial toe) mantar riskini azaltır
- Cilde dost
Eko-Tex 100 standardına göre üretilmektedir, hipoalerjiktir.
- Yıka ve giy
Makinede yıkanabilir ve kurutulabilir.

Kontraendikasyonları: Arterial bozukluklar, bacaklarda güçlü ödem, pulmoner ödem, sağ karıncık ile ilgili kalp problemleri, bacadaki lokal enfeksiyonlar.

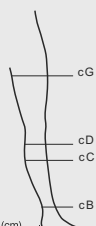18 mmHg

| MODEL | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|---|---|
|  | A - G/Sn dizüstü silikon bantlı | A - D dizaltı | A - G/Sn dizüstü silikon bantlı (kasiğe kadar) |  |  |  |
| | thrombex® | thrombexin®18 | thrombexin®18 | | | |
| KOD | 912 | 913 | 914 - 915 ^(bel kemerli) | | | |
| Bedenler | Çevre ölçüsü (cm) cB cG | | Çevre ölçüsü (cm) cB cC | | Çevre ölçüsü (cm) cB cG | |
| S | 20-22,5 | 48-60 | 20-22,5 | 30-36 | 20-22,5 | 48-60 |
| M | 22,5-25 | 56-70 | 22,5-25 | 34-40 | 22,5-25 | 56-70 |
| L | 25-27,5 | 64-80 | 25-27,5 | 38-45 | 25-27,5 | 64-80 |
| XL | 27,5-30 | 72-90 | - | - | 27,5-30 | 72-90 |



mediven® ulcer kit



Perfect Fit

20 mmHg



Kronik ülserlerin tedavisinde en iyi yöntem!

Gümüş yara bakımında yaygın olarak kullanılan bir elementtir. Yüksek yoğunluklarda gümüş konsantrasyonu kullanıldığında bakterilerin geniş alana yayılması engellenmektedir.

mediven ülcer çorabının en önemli özelliği gümüş elementinin dokumada kullanılan iplik ile birleştirilmesidir. Bu özellik sayesinde koku oluşumu engellenir ve mikroorganizmaların gelişmesine karşı direnç oluşturulur. Böylece mediven ülcer, uzun vadeli bir etki oluşturarak antibakteriyel koruma sağlar

mediven ulcer kit, iki farklı özellikte çoraptan oluşmaktadır

Bir çift mediven ulcer çorabı 24 saat boyunca 20 mmHg basınç uygulamak üzere tasarlanmıştır.

Bir çift mediven ulcer çorabı, bir tanesi gece bir tanesi gündüz kullanılmalıdır. Bu sayede gümüş elementinin antibakteriyel etkisine ara verilmeden sürekli uygulama sağlanmaktadır.

95°C'ye kadar sıcaklıklarda yıkanabilmektedir.

Bir adet mediven plus çorabı da yine 20 mmHg bilek basıncı uygulamaktadır. Gün içerisinde gümüş dokumalı ülser çorabının üzerine giyilerek kompresyon tedavisi sağlamaktadır. Gece ise sadece ülser çorabının giyilmesi önerilmektedir.

Gün içerisinde, bu iki çorabın kombinasyonu ile 40 mmHg basınç sağlanarak akut fazdaki ülserin tedavisi için gerekli kompresyon sağlanmaktadır.

Özellikler

Gözlem açıklığı: Hasta güvenliği için özel olarak tasarlanmış gözlem açıklığı kan sirkülasyonunun izlenmesine olanak sağlamaktadır.

Yumuşak bant: Çorabın bitim kısmındaki hassas bant sayesinde herhangi bir sıkma olmadan çorabın kayması engellenmektedir.

Renkli topuk dokuması: Çorabın doğru pozisyonda giydirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Bu renk farklılıkları sayesinde beden seçimi de daha hızlı yapılmaktadır

mediven® lenf pedleri

Endikasyonlar

Birincil ve ikincil lenf ödem
Lipo-ödem

Fonksiyon

Ödemin tedavi edilmesinde destek sağlar. Özel yapısı ile bandaj ya da çorap altında yerleştirilen bölgede daha yüksek basınç uygulayarak, hassas bir drenaj sağlar.

Kullanım

Kesilerek, bütün halinde ya da bir kaç parça bir arada, bandaj ya da çorap altında kullanılabilir.

Özellikler

- Teraputic olarak şekillendirilmiş sentetik latekstir.
- Cilde dost, hava ve su geçirgendir.
- Kesilerek şekillendirilebilir.
- Dokusunu ve şeklini korur.
- En uygun inceliktedir.
- 40 derecede deterjanla hassas programda yıkanabilir.




7500022 - finely napped
kol için noktalı model



7500001 - coarsely napped
lipo ödem için noktalı model



7500011 - ribbed
bacak için oluklu model

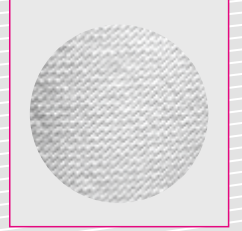

yırtılma ve kaçmaya karşı
güçlendirilmiş, daha dayanıklı
yeni polyamid dokuma

ELSA Ortopedi

Elsa Ortopedi, üründe kalite, hizmette kalite temel prensibine dayanarak 1998 yılında kurulmuştur. TPE tarafından marka tescilini almış ve ISO-13485 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaktadır.

Kurulduğu yıldan günümüze kadar, ithalatını yaptığı ürün yelpazesini her geçen gün arttırarak sağlık sektöründe hizmet vermeye devam etmektedir. Dağıtımını yaptığımız fizik tedavi cihazları, ortopedik ürünler, varis çorapları ve sporcu sağlığı ürünleri, tüm dünyada kabul görmüş markalar olup, Türkiye pazarına firmamız tarafından sunulmaktadır.

Elsa Ortopedi; Ankara merkez ofis, Ankara şube ve İstanbul bölge müdürlüğü olmak üzere 3 merkezden yürütülmektedir. Merkezlerimiz dışında Türkiye bölgelerinde bulunan bayiler ile hizmet verilmektedir. TSE-HYB belgesine sahip teknik servisi departmanı ile satışı yapılan cihazların teknik servis hizmeti Ankara merkez ofiste ve İstanbul bölge müdürlüğünde verilmektedir.

 **ELSA**



Ortopedi, Rehabilitasyon, Spor Malzemeleri

Ankara Merkez:

Çaldıran Sokak No:14/A Kolej 06420
Tel: (0312) 434 27 94 - 434 42 94 - 434 11 67
Faks: (0312) 434 22 82 - 434 17 67

Ankara Şube:

Süleyman Sırrı Sokak No: 21/B Sıhhiye
Tel: (0312) 432 02 45 - 432 12 43
Faks: (0312) 432 42 87

İstanbul Şube:

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1603 Şişli
Tel: (0212) 320 88 81 (4 hat)
Faks: (0212) 320 88 85

www.elsa.web.tr info@elsa.web.tr

medi. I feel better.